



انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران
برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAP)
دوره سی و ششم (نوبت اول سال ۱۳۹۹)



همکار ارجمند:

با سلام، به اطلاع می‌رسانیم از دوره ۳۶، سیستم میکروسکوپ مجازی (virtual Microscopy) که یکی از پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌های روز دنیا در حوزه اسکن و مشاهده لام‌های مجازی میکروسکوپی می‌باشد در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سعی مدیران برنامه بر بهبود کیفیت لام‌های ارسالی مورد انتظار مشارکت کنندگان بوده است.

راهنمای ورود به سیستم میکروسکوپ مجازی:

- ۱- برای ورود به سیستم ابتدا از طریق آدرس eqap.iaclld.com به سامانه "جامع برنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی" وارد شوید.
- ۲- در صفحه اصلی سایت در قسمت راهنماها و روشها وارد شده و بر روی گزینه نرم افزار مشاهده لام مجازی کلیک نمایید.
- ۳- ابتدا راهنمای درج شده در این صفحه را مطالعه نمایید، سپس از طریق لینک ارائه شده در همین صفحه، برنامه را نصب کنید.
- ۴- پس از نصب نرم افزار و ورود به سامانه با "کد و پسوورد EQAP آزمایشگاه خود" لام‌های مجازی بارگذاری شده را مشاهده نمایید.
- ۵- برای گزارش نتایج مانند سنوات گذشته از طریق سامانه eqap.iaclld.com اقدام فرمایید.

توجه:

در صورتی که طی اطلاع‌رسانی‌های دفتر برنامه در چند روز گذشته، موفق به نصب نرم افزار شده‌اید نیاز به نصب و راه‌اندازی مجدد سیستم نمی‌باشد.



انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی - ایران
برنامه ارزیابی خارجی کیفیت (EQAP)
دوره سی و ششم (نوبت اول سال ۱۳۹۹)



توجه: این برگ پاسخ‌گویی فقط برای آزمایشگاه‌هایی است که در برنامه گستره مجهول جهت ارزیابی "Acid Fast Bacilli / AFB" ثبت نام کرده‌اند و برای آنها نمونه ارسال شده است.

نام آزمایشگاه: ----- کد شناسایی آزمایشگاه: EQAP-

--	--	--	--	--

 توجه: ثبت کد شناسایی الزامی است

برای آزمایش روی نمونه با مشخصات: M3- 9936

زمان پاسخ‌دهی فقط از طریق اینترنت ۹۹/۰۶/۲۴ تا ۹۹/۰۷/۰۶

نمونه شماره 3- گستره مجهول جهت ارزیابی "Acid Fast Bacilli / AFB"

هدف: ارزیابی توان تشخیص و گزارش AFB

۱. گستره مجهول رنگ شده است.
۲. گستره را بررسی نمایید و ۱۰۰ میدان میکروسکوپی (Field) را از نظر وجود باسیل‌های اسید فست AFB جستجو و در صورت مشاهده بر طبق معیار جدول زیر گزارش کنید.
۳. در جدول گزارش نتایج، فقط یک مورد را که با پاسخ شما مطابقت دارد، انتخاب کنید و با علامت ✓ مشخص نمایید.

علامت ✓	Report	Fields / OIF	Number of AFB
	Negative for AFB	Per 100 Fields	No AFB
	1-9 AFB / 100 Fields	Per 100 Fields	1-9 AFB
	1+	Per 100 Fields	10-99 AFB
	2+	Per Field	1-10 AFB
	3+	Per Field	>10 AFB

نام مسئول فنی

مهر و امضاء

تاریخ: