

### «نمونه مجهول سرولوژی برای آزمایش های خانواده رایت»

(شامل Wright Test, Coombs Wright, 2ME Wright, Wright Screen)

انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره برنامه فعلی (دوره پنجاه و چهارم) اعلام نمائید:

## روش کار

الف) آماده سازی:

محتویات ویال بصورت آماده در اختیار شما قرار گرفته است و نیاز به آماده سازی ندارد.

ب) انجام آزمایش:

لازم است آزمایش رایت لوله ای و رایت احیاء شده و کومز رایت را به روش رایج در آزمایشگاه خود انجام دهید.

تذکر: ماده مجهول مورد آزمایش از نمونه سرمی ظاهراً ایمن فراهم آمده است ولی باید با رعایت کلیه احتیاطات لازم، با آن همچون یک نمونه بیولوژیک بالقوه بیماریزا کار شود.

ج) گزارش دهی:

نتیجه آزمایش را برای هر یک از تست های مربوطه (به صورت مثبت ، منفی ، نامعین ، تیتراژ و غیره) در مکان های خالی جدول مربوطه درج نمائید.

توجه: ثبت کد شناسایی الزامی است

EQAP-

کد شناسایی آزمایشگاه:

نام آزمایشگاه: \_\_\_\_\_

برای آزمایش روی نمونه با مشخصات: S3-0554

زمان پاسخ دهی فقط از طریق اینترنت ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۰

توجه:

هنگام ثبت نتایج در نرم افزار تحت شبکه چنانچه بخشی از صفحه یا عدد وارد شده در صفحه نمایشگر شما قابل مشاهده نمی باشد ، با گرفتن همزمان کلید Ctrl و علامت های + و - در صفحه کلید (یا حرکت دادن چرخک موشواره بعد از نگه داشتن کلید Ctrl) ، تصویر صفحه خود را بزرگتر یا کوچکتر کنید.

| نام آزمایش    | روش مورد استفاده                                                                                                                                                                                                                              | حجم سرم مصرفی (μL) (لاندا) | شرکت سازنده کیت یا سوسپانسیون میکروبی | شماره سری ساخت کیت یا سوسپانسیون میکروبی | شرکت سازنده Anti Human | شماره سری ساخت Anti Human | معرف 2ME | شماره سری ساخت 2ME | واحد اندازه گیری | نتیجه (اگر جواب شما 1/X بصورت باشد، تنها مخرج کسر را بنویسید) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wright Test   | <input type="checkbox"/> STA (Standard Tube Agglutination)<br><input type="checkbox"/> Centrifuge - Wright<br><input type="checkbox"/> ELISA<br><input type="checkbox"/> Gel Method<br><input type="checkbox"/> other<br>(با ذکر نام - غیره): |                            |                                       |                                          |                        |                           |          |                    |                  |                                                               |
| Coombs Wright | نام روش:                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       |                                          |                        |                           |          |                    |                  |                                                               |
| 2ME Wright    | نام روش:                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       |                                          |                        |                           |          |                    |                  |                                                               |
| Wright Screen | <input type="checkbox"/> Slide Rapid<br><input type="checkbox"/> Rose Bengal / Card Test                                                                                                                                                      |                            |                                       |                                          |                        |                           |          |                    |                  |                                                               |

- ✓ **تذکر یک:** چنانچه برای ۳ آزمایش اصلی (شامل: رایت استاندارد لوله ای و آزمایش کومز رایت و آزمایش رایت احیاء شده)، نتیجه آزمایش را بصورت تیترا گزارش می نمائید، فقط عدد صحیح را به صورت معکوس رقت درج نمائید. (مانند: ۳۲۰) و از نوشتن ۱/۳۲۰ یا ۱:۳۲۰ و غیره خودداری کنید.
- ✓ **تذکر دو:** نتیجه آزمایش **Wright Screen** را مختارید که بصورت نیمه کمی (تیترا یا معکوس رقت) و یا بصورت نیمه کیفی (از ۱+ تا ۴+) درج کنید. البته در حالت نیمه کیفی از قاعده زیر پیروی نمایید:
- ❖ به جای منفی (-) عدد صفر (۰)، و به جای (+) عدد (۱)، (++) عدد (۲)، (+++) عدد (۳)، (+++++) عدد (۴) را وارد کنید.
- ✓ **تذکر سه:** روش مورد استفاده (ذکر شده در جدول فوق) می تواند یکی از این موارد باشد: آگلوتیناسیون، الیزا، نفلومتري و غیره.
- ✓ **تذکر چهار:** واحد اندازه گیری می تواند یکی از این موارد باشد: تیترا، IU/mL، AU/mL، و غیره و حتی فاقد واحد اندازه گیری.