



## Semen Analysis

توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را برای پیگیریهای بعدی برای خودتان یادداشت نمائید.

توجه: ثبت کد شناسایی الزامی است  
 نام آزمایشگاه: \_\_\_\_\_ کد شناسایی آزمایشگاه: EQAP -

برای آزمایش روی نمونه با مشخصات: B5- 0247

زمان پاسخدهی فقط از طریق اینترنت ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

دستورالعمل آماده سازی نمونه:

روش استفاده:

- نمونه حاوی مایع سیمن بوده که باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شود.
- از یخ زدگی نمونه جلوگیری شود.
- ده دقیقه قبل از انجام آزمایش ویال حاوی نمونه از یخچال خارج گردد.
- ویال حاوی نمونه را به مدت ۳۰ ثانیه به آرامی ورتکس کنید تا نمونه کاملاً بصورت یکنواخت آماده انجام آزمایش گردد.
- تعداد اسپرم را مطابق روش رایج در آزمایشگاه خود شمارش نموده و در جدول مربوطه ثبت نمائید.

خواهشمند است محاسبات را به دقت انجام داده و جدول انجام آزمایشها را بر اساس اطلاعات درخواستی شامل مطالب ذیل را به شکل صحیح وارد نمائید. بدیهی است ثبت ناقص اطلاعات مورد نیاز سبب دسته بندی و آنالیز آماری نامناسب یا حذف آزمایش خواهد شد.

نام آزمایش	روش	نتیجه	دوره	واحد
Sperm concentration	<input type="checkbox"/> Computer Assisted Semen Analysis(CASA) <input type="checkbox"/> Improved Neubauer <input type="checkbox"/> Other			millions/mL
Sperm morphology	<input type="checkbox"/> WHO 1999 <input type="checkbox"/> WHO 2010 <input type="checkbox"/> WHO 2021			% normal