

« نمونه مجهول میکروآلبومین B3/3) UMA »

انتقادات و پیشنهادهای خود را درباره برنامه دوره پنجاه و چهارم EQAP بخش میکروآلبومین اعلام نمائید.

توجه: ثبت کد شناسایی الزامی است
نام آزمایشگاه: _____ کد شناسایی آزمایشگاه: EQAP -

برای آزمایش روی نمونه با مشخصات: B3/3- 0554

زمان پاسخدهی فقط از طریق اینترنت ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را برای پیگیریهای بعدی برای خودتان یادداشت فرمائید.

روش استفاده:

۱. محتویات ویال بصورت آماده در اختیار شما قرار گرفته است.
۲. در صورت نیاز به نگهداری نمونه بهتر است آنرا به لوله مناسب منتقل کرده و در دمای یخچال تا یک هفته یا در ۲۰- درجه تا یکماه قرار دهید.

توجه:

۱. خواهشمند است محاسبات را به دقت انجام داده و جدول انجام آزمایشها را بر اساس اطلاعات درخواستی شامل نام سازنده کیت، شماره سری ساخت کیت، روش انجام، متد مورد استفاده و نتیجه بدست آمده، به شکل صحیح وارد نمائید. بدیهی است ثبت ناقص اطلاعات مورد نیاز سبب دسته بندی و آنالیز آماری نامناسب یا حذف آزمایش خواهد شد.
۲. نتایج آزمایش میکرو آلبومین ادرار باید در سه حالت گزارش شود. در دو حالت ابتدایی تصور کنید نمونه ارسالی نمونه ادرار تصادفی با غلظت کراتینین ۸۰ mg/dL است و لازم است نتیجه با واحدهای mg/L و mg/g Creatinine گزارش شود. در حالت سوم نیز فرض کنید نمونه مربوط به یک ادرار ۲۴ ساعته با حجم 1500 mL/24h است که در این حالت نیز می بایست نتیجه با واحد mg/24h گزارش گردد. (رجوع شود به توضیحات گزارش پروتئین ادرار در صفحه ۷)

نتیجه	واحد گزارش	متد مورد استفاده	روش انجام	شماره سری کیت	سازنده کیت	نام آزمایش
	mg/L	☐ Nephelometry ☐ Turbidimetry ☐ EIA & ELISA ☐ FIA & ELFA ☐ CLIA & ECLIA	دستی دستگاهی			Urine Microalbumin
	mg/g Creatinine	☐ Nephelometry ☐ Turbidimetry ☐ EIA & ELISA ☐ FIA & ELFA ☐ CLIA & ECLIA	دستی دستگاهی			Microalbumin/Cr Ratio
	mg/24h	☐ Nephelometry ☐ Turbidimetry ☐ EIA & ELISA ☐ FIA & ELFA ☐ CLIA & ECLIA	دستی دستگاهی			Microalbumin (24h)

دستگاه اتوآنالایزر	مدل دستگاه	
دستگاه فتومتر یا اسپکتروفتومتر	مدل دستگاه	